



Medizinisches Babylammfell

Wolly Babylammfelle und Bettfelle sind medizinisch gegerbte Naturprodukte von höchster Reinheit und Qualität. Die medizinische Gerbung ist waschbar und ermöglicht eine lange Lebensdauer.

Erläuterung: Wolly Lammfelle sind Naturprodukte deren Schönheit und Qualität am besten durch einen schonenden Umgang erhalten wird. Jeder Waschvorgang verringert die Lebensdauer des Produkts. Natürliche Wolle hat eine selbstreinigende und bakterienhemmende Wirkung.

Pflegeanleitung: Regelmäßiges ausschütteln, bürsten und lüften macht ein Waschen oft überflüssig.

Bei leichter Verunreinigung, Schmutzstellen mit einem feuchten Schwamm oder Tuch (leichte Seifenlösung) abwischen und anschließend trockentupfen.

Bei stärkerer Verunreinigung können medizinische Lammfelle von Hand oder in der Maschine im Wollwaschgang bei maximal 30 Grad Celsius gewaschen werden. Anschließend gut ausschleudern (mindestens 1200 U/min). Bitte verwenden Sie ein speziell entwickeltes, rückfettendes Spezialwaschmittel (mit Lanolinanteilen). Durch die besondere Zusammensetzung bleibt das Leder weich und elastisch.

Dann das Fell an einem luftigen, schattigen Ort, liegend, mit der Lederseite nach oben trocknen. Dabei das Fell niemals einer Wärmequelle oder der direkten Sonne aussetzen. Während dem Trocknen muss das Fell in die ursprüngliche Form gezogen werden und durch walken (die Lederflächen gegeneinander reiben) weich gemacht werden. Dieser Vorgang (ziehen und walken) muss beim Trocknen mehrmals wiederholt werden.

Anschließend sollten Sie die trockene Wolle mit einer groben Bürste vorsichtig bearbeiten und Ihr Fell ist wieder einsatzbereit.

Bei unsachgemäßer Behandlung kann es zu Schädigungen am Lammfell kommen, für die wir keine Haftung übernehmen können.

Noch Fragen?

Medizinische Babylammfelle und Schaffelle und weitere Informationen erhalten Sie per Telefon 07123-9220-0, oder im Internet unter <http://www.erwin-fritz.com> oder per Email: info@erwin-fritz.de

oder bei:

Wolly Erwin Fritz GmbH & Co.

Qualität aus Lammfell

Ermsstrasse 3

D-72555 Metzingen – Neuhausen